



Hinweise zu unserem 3D-Drucker Freeshape 120

Allgemein:

Am besten werden Qualitätsprodukte verwendet. Bitte benutzen Sie, wenn möglich, die WLAN beziehungsweise Wi-Fi Verbindung. Zur Reinigung des Geräts und Zubehörs empfehlen wir Isopropanol zu verwenden.

Tipps zur Einstellung des Netzwerks / WLAN / Wi-Fi:

Schalten Sie die WLAN-Verbindung erst aus & dann wieder an. Gehen Sie jetzt über „Netzwerke suchen“ und wählen ihren WLAN-Zugang. Geben Sie nun in Ihren Browser die angezeigte IP-Adresse ein.

Empfehlung zur In-Betriebnahme:

Kalibrieren Sie Ihr Gerät bei der ersten Installierung am tatsächlichen Einsatzort. Laut Hersteller ist das nicht notwendig. Kontrollieren Sie diesen Vorgang regelmäßig alle paar Monate. Nutzen Sie dafür die Diagnose-Funktion (Axe/Auto-Anpassung/Passwort: 1qaz).

Tipps zur Reinigung des Geräts:

Die Reinigung des Geräts ist sehr wichtig und hat Auswirkungen auf ihre Arbeitsergebnisse. Spätestens alle 14 Tage sollte das Gerät bei regelmäßiger Nutzung gereinigt werden.

Tipps zur Reinigung der Druckwannen:

Die Druckwannen sollten spätestens alle 14 Tage gereinigt werden. Wichtig ist, dass die Transparenz des Einlegebodens gegeben ist.

Tipps zum Umgang mit der Druckwanne:

Bitte beachten Sie, dass das Fülllimit unterhalb des Auslaufs für den Kunststoff ist. Bitte füllen Sie die Druckwanne nicht darüber hinaus.

Tipps zum Umgang mit ADORPRINT-Kunststoffen:

Wir empfehlen beim Leeren des Kunststoffs einen Metallfilter zu nutzen. Gerne können Sie pro Kunststoff eine Druckwanne verwenden. Das erleichtert die Reinigung und deren Intensität. Sie können den Kunststoff in der Druckwanne belassen und es in den mitgelieferten Kartons lagern. Wichtig ist, den Kunststoff weder Licht noch großer Hitze auszusetzen. Der Kunststoff sollte in der Flasche vor der Nutzung geschüttelt werden. Sollten Sie den Kunststoff in der Druckwanne lassen, rühren Sie diese bitte vor Nutzung um. Nutzen Sie dafür gerne den Plastikschieber aus unserem Reinigungspaket.

Tipps im Umgang mit der LCD-Platte:

Wir empfehlen den Austausch der LCD-Platte beziehungsweise des Druckbildschirms mind. alle 6 Monate.

Tipps im Umgang mit fertig gestellten Arbeiten:

Wir empfehlen pro Kunststoff zwei Boxen mit einer Alkohollösung zu verwenden. Dafür eignet sich Isopropanol. Tauchen Sie die Arbeiten in die erste Box ein und lassen diese 3-4 Minuten verweilen. Nehmen Sie sie dann heraus und legen Sie diese andersrum in die 2. Box. Ebenfalls 3-4 Minuten verweilen lassen. Nutzen Sie im Nachgang gerne unser Ultraschallbad mit Wasser. Trocknen Sie nun die Arbeit mit Reinigungstüchern ab und nutzen Sie im Anschluss ein UV-Gerät.

Hinweis zu Updates:

Bitte installieren Sie Updates erst nach unserer Freigabe.